

Turtlebrace

Turtlebrace de cheville

Orthèse d'immobilisation à base de thermoplastique, pour la cheville, moulable directement sur la personne.

Produit

Orthèse de type « appliquer et oublier » fabriquée à partir d'un stratifié de thermoplastique basse température multiperforé et de tissu microfibre anti-bactérien.

La grande souplesse des composants permet de stabiliser un segment plus facilement et plus précisément qu'une orthèse traditionnelle ou qu'une immobilisation plâtrée

Peut-être remoulé plusieurs fois, sans perdre ses qualités; ce qui permet des ajustements en fonction des pertes d'œdème ou des changements morphologiques.



Caractéristiques

- Moulable directement sur le segment
- Tissu antibactérien
- Radiotransparent
- Submersible et autodrainant
- Moulable à répétition sans limite et sans dégradation
- 3,2 mm d'épaisseur pour faciliter l'habillement

Classification

Produit non stérile à usage unique de Classe 1 (Santé Canada)


Indications

Fracture stable, entorse, immobilisation postopératoire, déchirure tendons d'Achille, tendinite, protocole d'immobilisation en série (serial casting), contrôle de la spasticité, neuropathie de la cheville.

80, rue des Artisans - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
 T +33 (0)9 51 88 90 49 - F +33 (0)9 56 88 90 49
 M +33 (0)6 12 06 56 56
 contact@go-ortho.fr

www.go-ortho.fr

goortho
 composants pour l'orthopédie

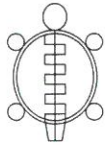


Turtlebrace

Turtlebrace de cheville

Modèles

	Pédiatrique	
	Standard	Renforcé
Petit (16.5 cm - 27.6 cm)	TBCP-01	n/a
Moyen (17.8 cm - 29.8 cm)	TBCP-02	TBCPR-02
Large (19cm-31.8cm)	TBCP-03	TBCPR-03
	Adulte	
	Standard	Renforcé
Petit (20.3cm - 34cm)	TBCA-01	TBCAR-01
Moyen (21.6 cm - 36.2 cm)	TBCA-02	TBCAR-02
Large (22.9 cm - 38.4 cm)	TBCA-03	TBCAR-03

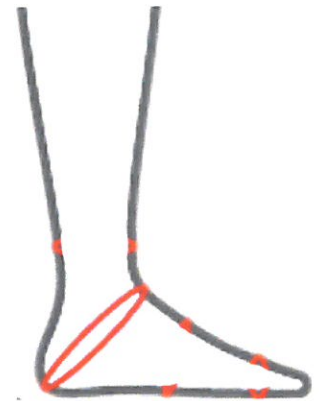

Instruction de moulage

- 1- Chauffer l'orthèse à la chaleur sèche ou humide, entre 67 °C et 85 °C, pour qu'elle devienne malléable
 - Méthode chaleur sèche
Mettre l'orthèse dans le sac chauffant Turtlebrace, dans un four conventionnel ou à convection environ 5 minutes.
 - Méthode chaleur humide
Mettre l'orthèse dans un bac d'eau chaude de 3 à 5 minutes.
- 2- Une fois l'orthèse rendue souple et malléable, vous pouvez draper l'orthèse sur la personne. Assurez-vous que la température de l'orthèse ne risque pas de brûler la personne.
- 3- Placez la personne dans la position désirée et attendre que l'orthèse durcisse.

Une fois durcie, l'orthèse gardera sa forme jusqu'à ce qu'elle soit chauffée à nouveau.

Précautions d'emploi

Ne pas draper l'orthèse trop chaude sur la peau pour éviter les brûlures et les inconforts. Ne pas chauffer à plus de 100 °C, car le tissu et/ou la fermeture éclair pourraient brûler ou fondre.

Si vous utilisez un pistolet à air chaud, faites attention de ne pas brûler le tissu.

Information

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations.

- Communiquez avec notre distributeur ci-dessous :
- Consultez notre site internet au
- Écrivez-nous à : contact@go-ortho.fr